

iOS7~11.0/11.3.1対応
スイッチアダプター

ZyBox2 SC

アップル社の新しいiOS 7-11.0には、強力なアクセシビリティ機能、スイッチコントロールが搭載されています。ZyBox2 SCは、それらのオペレーティングシステム端末を外部スイッチによって代替操作するためにデザインされています。



iPad/iPhone 用 30 ピン Dock コネクタ



iPad/iPhone 用 DC5V 充電差込口

3.5mm プラグ用 コントロール スイッチ

電源ランプ



スイッチコントロールは、タッチスクリーンを容易に使うことのできない iOS タブレットユーザーのためのアクセシビリティ機能です。ユーザーは、1~3 個までのスイッチで、iOS 7-11.0 のほとんどの機能を操作することが可能です。ZyBox2 SC は、スイッチコントロール機能を利用するためのスイッチインターフェースです。ZyBox2 SC を、お手持ちの iPad/iPhone に、30 ピン Dock コネクタを使って接続します。そして 1~3 個の 3.5mm モノラルプラグのスイッチを ZyBox2 SC に差し込んで下さい。ほとんどの iPad/iPhone の操作を外部スイッチで行うことができます。ZyBox2 SC を iOS 端末につなぐと電源ランプが点灯します。そして iPad/iPhone は、自動的に ZyBox2 SC を認識します。

iOS 端末で初めてスイッチコントロールを使う際、まずスイッチの動作設定が必要となります。一旦スイッチ動作が設定されると、その設定内容は、iOS 端末に保存されます。このため、ZyBox2 SC とスイッチを接続するたびに、この設定作業を再度行う必要はありません。

一旦 ZyBox2 SC と 3 個までの簡単なスイッチ設定を完了すると、あとは同様の手続きは必要ありません。ZyBox2 SC は、30 ピン Dock コネクタを使い、iOS 端末に接続されるため、Bluetooth を使った、スピーカー、キーボード、携帯電話等は従来どおりにお使い頂けます。

※ZyBox2 SC の消費電力は、とても小さいため、Bluetooth 接続と違い、バッテリーでの長時間駆動を実現します。

iOS 端末のスイッチコントロールを設定するには、設定 > 一般 > アクセシビリティ > スイッチコントロール > スイッチコントロール・オンに設定して下さい。また、スキャンスピードやスキャンの方法を調整することが可能です。

ZyBox2 SC の機能(iOS7-11.0/11.3.1 でお使いの場合) :

- ・ iPad1 と 2 の iOS 端末には、本体から出ている 30 ピン Dock コネクタで接続します。
- ・ **最新 iOS 端末の場合、別売 Apple 社純正 Lightning-30 ピン変換アダプターが必要になります。**
- ・ 最大 3 個までの別売外部スイッチ (3.5 インチモノラルプラグ) を差し込むためのモノラルジャックを搭載しています。
- ・ スイッチインターフェースとして iOS 端末側に自動認識されます。
- ・ 追加ソフトウェアは不要です。初回接続のみスイッチコントロールとスイッチ操作の設定が必要です。
- ・ ZyBox2 SC の電源 On 状態を示すため、電源ランプが点灯します。
- ・ ZyBox2 SC は、iOS 端末から電源供給されますが、USB 電源ケーブルを ZyBox2 SC に接続すると、ZyBox2 SC から iOS 端末に電源供給することも可能です。



スイッチコントロール使用の際、ポップアップメニューが表示され、多くの高度な機能を使うことが可能です。このメニューから、スクロール(Scroll)、ジェスチャー(Gestures)、デバイス(Device)または、設定(Settings)を選択すると、より高度な機能を使うことができるセカンドメニューか、スイッチコントロールの設定画面が表示されます。

※2018年5月18日現在、最新 iOS 11.3.1 対応 ご注意: iOS11.1~11.2 では MFi 認証不安定のため、使用しないで下さい。