

スマート・ナビ 4AT モデル

～代替マウスの決定版！～ ¥99,500+税

上肢障害があっても頭部などの僅かな動きだけでマウス操作が可能！



スマート・ナビ本体部



スマート・ナビ使用イメージ: PC モニタに本体を設置
本体が例えば帽子の先につけた反射シールの動きを捉えます。

☆動作原理: 任意に動かせる体の一部等に反射シールを貼り、動きに合わせてそこから反射する赤外線を、「スマート・ナビ」が追尾することにより動作します。

☆クリック操作の方法

①完全なハンズフリーで操作する方法: カーソルの移動だけでなくクリック操作もできます。



画面上に、左図のようなクリック操作のアイコンバーが表示されます。希望操作のアイコン上にカーソルを置けば操作ができます。

②クリック操作は、外部スイッチを利用する方法

外部スイッチを本体に接続して、左右のクリック操作をスイッチで行うこともできます。

※1または2入力の外部接続スイッチ(無電圧接点/3.5 モノラルミニプラグ)に対応
(製品には、外部スイッチは付属しません。)

動作環境

- ・対応 OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
- ・接続ポート: USB (インストール時 CD-ROMドライブ必要)

*試用貸出もっておりますので、お気軽にお問合せ下さい！

COM FRIEND
株式会社 コムフレンド

〒612-8427 京都市伏見区竹田真幡木町 53
栗塚ビル 301

TEL: 075-632-8655 FAX: 075-320-3864

E-Mail: contact@com-friend.co.jp

URL <http://www.com-friend.co.jp>